

EN

**Application:**

Mat to increase friction.

**Care:**

Clean with a detergent or disinfectant solution. Wipe with a cloth.

**N.B.:**

Do not subject the product to heavy or abrupt pressure. Imposing loads at single points can lead to marks in the material.

SE  
NO  
DK

**Avsedd användning/beregnet bruk/beregnet brug:**

Matta/måtte som ökar/øker/øger friktion.

**Skötsel/vedlikehold/pleje:**

Rengör med diskmedels- eller desinfektionslösning/oppvaskmiddel eller desinfiseringslösning/oppvaskmiddel- eller desinfektionsmiddelopløsning. Avtorkas med trasa/Tørk av med klut/Aftørres med klud.

**Observera/merk/bemærk:**

Utsätt inte produkten för hårda eller skarpa tryck. Punktbelastning kan leda till/føre til/medføre mærken i materialet.

DE

**Vorgesehene Verwendung:**

Rutschfeste Unterlage zur Verhinderung des Wegrutschens des Patienten.

**Funktionskontrolle:**

Überprüfen, dass die Antirutschfunktion des Produkts auf der betreffenden Unterlage wirkt.

**Pflege:**

Mit Spülmittel oder Desinfektionsmittel reinigen, dann mit Tuch abwischen.

**Hinweis:**

Das Produkt nicht durch spitzen oder harten Gegenstand belasten. Punktuelle Belastung kann Abdrücke im Material hinterlassen.



**Checking functionality:**


Check that the anti-slip function of the product works against the surface where it is used.

**Kontroll av funktion:**


Kontrollera att produktens antihalkfunktion/antiglidfunksjon/anti-skridfunktion fungerar mot underlaget där den används.

**Funktionskontrolle:**

Überprüfen, dass die Antirutschfunktion des Produkts auf der betreffenden Unterlage wirkt.

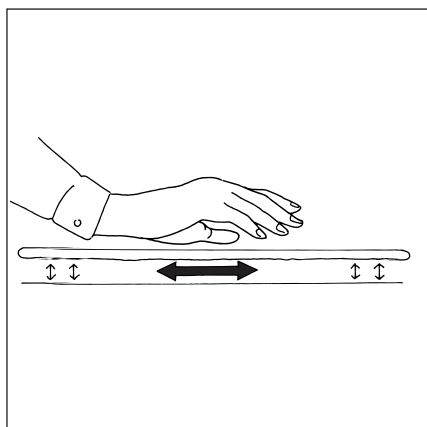

# Manual

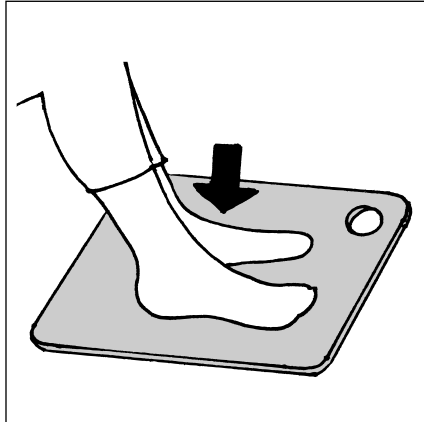

## Positioning:



Under the feet, on the floor or in the bed, for good securing. Under the feet when moving further up in bed, between wheelchair and bed to raise from sitting to standing, lifting pelvis when dressing etc.

## Placing:

Under fötterna, på golvet eller i sängen, för att få bra/godt fäste. Under fötterna vid förflyttning högre/høyere opp/højere op i säng, mellan rullstol/kørestol till säng, att resa/reise/rejse upp från sittande till stående, bäckenlyft/bekkenløft/bækkenløft vid påklädning, etc.

## Platzierung:

Unter den Füßen, auf dem Fußboden oder im Bett, um den Füßen guten Halt zu haben. Unter den Füßen beim Bewegen nach oben zum Kopfende des Betts hin, zwischen Rollstuhl und Bett, zum Aufstehen aus dem Sitzen, zum Anheben des Beckens beim Ankleiden etc.

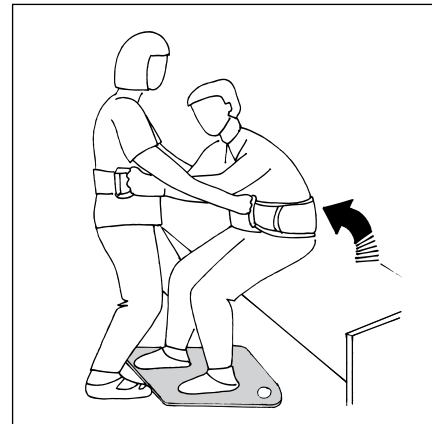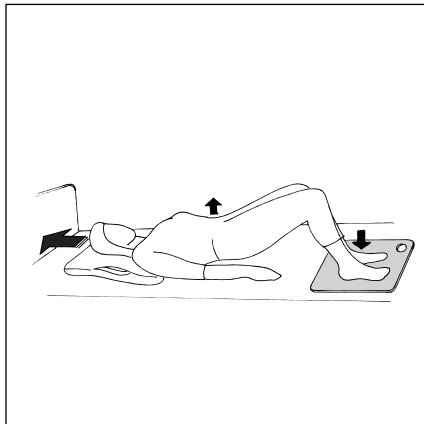

Ross AntiSlip +  
Ross WendyLean



Ross AntiSlip +  
Ross FlexiBelt

## Information:

For further information, contact your specialist in transfer, our representative or [www.romedic.com](http://www.romedic.com). Ensure that you always have the latest version of the manual. It can be downloaded from our website: <http://www.romedic.com/manuals.htm>

Vid behov av/for ytterligare information, kontakta er/jeres/deres specialist i förflyttningsteknik/flytteteknik, vår representant eller [www.romedic.com](http://www.romedic.com)

Se till/pass på/sørg for att du alltid har den senaste versionen av manualen. Den finns att ladda ned/kan lastes ned/kan hentes ned från vår hemsida/hjemmeside; <http://www.romedic.com/manuals.htm>

Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Fachmann für Bewegungstechnik, unseren Vertreter oder unter [www.romedic.com](http://www.romedic.com)

Kontrollieren Sie, dass die letzte Version der Bedienungsanleitung zugänglich ist. Diese kann von unserer Homepage heruntergeladen werden: <http://www.romedic.com/manuals.htm>